


Annulation des tests de coagulation quand les tubes sont pas suffisamment rempli - RAPPEL

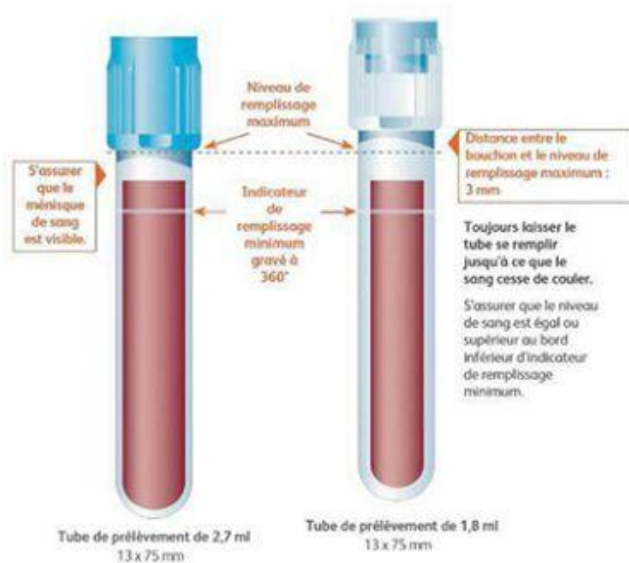

À tous les utilisateurs du laboratoire central du site Glen CUSM

Optilab Mtl -CUSM, Site Glen souhaite vous rappeler que les tubes prelevés pour les tests de coagulation doivent respecter le ratio anticoagulant à sang ($\pm 10\%$).

Recentment, le laboratoire a reçu un nombre croissant de tubes insuffisamment remplis. Une inspection plus approfondie a permis de constater que les tubes utilisés étaient périmés, ce qui est la cause probable de la perte de vide entraînant le remplissage insuffisant des tubes. **Veillez vérifier votre stock et vous assurer que vous n'utilisez pas de tubes périmés.**

Sur les tubes de citrate de sodium, fabriqués par BD Life Sciences, la ligne de remplissage minimum (rempli à 90 %) est indiquée par une ligne gravée autour du tube. Pour atteindre le niveau minimum, le sang doit être égal ou supérieur au bord inférieur de l'indicateur de remplissage minimum.

Si vous utilisez un ensemble de prélèvement papillon/ailettes, vous devez retirer un tube de rejet pour éliminer l'air de la ligne de prélèvement avant de prélever des tubes pour des études de coagulation.

Si vous utilisez une seringue pour remplir les tubes, veillez à ne pas trop remplir les tubes. Sur un tube de 2,7 ml, le niveau de remplissage maximum est indiquée par le bord inférieur du bouchon, sur un tube de 1,8 ml, le niveau de remplissage maximum est à 3 mm en dessous du bord inférieur du bouchon (veuillez vous référer au diagramme).

Tous les tubes de coagulation sous-remplis ou trop remplis seront annulés comme échantillon inadéquat.

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle des laboratoires cliniques au 514-934-1934, poste 35687.

Nous vous remercions de votre collaboration et de votre compréhension.